

# Concentrateur d'oxygène portable P2

Votre concentrateur d'oxygène portable Rhythm Healthcare P2 est conçu pour vous permettre d'aller où vous le souhaitez tout en vous fournissant l'oxygène supplémentaire prescrit par votre médecin. Pour un fonctionnement optimal de votre appareil P2, il est nécessaire de nettoyer et de remplacer régulièrement les filtres et le couvercle du filtre, comme indiqué ci-dessous.



## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

### Couvercle de préfiltre # RY-P2PFC (Qty 20)

1. Avant de nettoyer le couvercle du préfiltre du P2, débranchez le P2 de l'alimentation secteur et éteignez-le.
2. Retirez le couvercle du préfiltre de l'appareil. Votre P2 peut être muni d'une vis à sa base. Si c'est le cas, retirez-la à l'aide d'un petit tournevis cruciforme avant de retirer le couvercle. Veuillez noter que la vis est facultative. Elle n'est pas nécessaire pour fixer le couvercle du préfiltre à l'appareil.
3. Une fois par semaine, nettoyez le couvercle du préfiltre sous l'eau du robinet pour éliminer les saletés et les débris. Si le couvercle du filtre est très sale, versez de l'eau tiède dans un récipient en plastique propre, ajoutez une cuillère à café de détergent doux et utilisez une brosse à poils doux, comme une brosse à dents, pour nettoyer le filtre.
4. Placez le filtre sur un essuie-tout propre et sec.
5. Il est très important que le couvercle du préfiltre soit complètement sec avant de le remettre en place.
6. Le P2 ne doit pas être utilisé sans le couvercle du préfiltre. Ce dernier doit être remplacé s'il est perdu, plié ou cassé.



### Filtre en coton # RY-P2FC

1. Avant de remplacer le filtre en coton, débranchez le P2 de l'alimentation secteur et éteignez-le.
2. Retirez le couvercle du préfiltre. Si votre P2 est équipé d'une vis, retirez-la à l'aide d'un petit tournevis cruciforme avant de retirer le couvercle du préfiltre.
3. Le filtre en coton est situé à l'intérieur de l'appareil, comme illustré sur le Diagramme B à gauche. Il ne peut pas être nettoyé ; il doit être remplacé.
4. Inspectez le filtre en coton une fois par semaine pour détecter toute trace de saleté, de poussière ou de cheveux.
5. Le filtre en coton doit être changé environ tous les 3 mois, selon la fréquence d'utilisation, la qualité de l'air et l'environnement.
6. N'utilisez pas votre P2 sans son filtre en coton. Cela pourrait l'endommager.



Diagramme B



Filtre en coton # RY-P2FC